

<p><b>1</b></p> <p>Reagenzien und Material im Kit.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Den Finger des Patienten kurz anwärmen. Benutzen Sie eine Lanzette, die einen guten Blutfluss gewährleistet. Stechen Sie in die Fingerspitze.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Fangen Sie das Blut mit dem Blutentnahmegesäß auf. Halten Sie es bei der Probenentnahme leicht nach unten und decken Sie das Loch am Ende des roten Kolbens während der Blutentnahme nicht ab.</p>
<p><b>4</b></p> <p>Legen Sie das Testgerät auf eine horizontale Fläche. Füllen Sie das Blut in den Probenträger, der mit einem roten Tropfen markiert ist. Legen Sie dabei Ihren Finger auf das Loch am Ende des Kolbens und drücken Sie vorsichtig die Blutprobe aus.</p>	<p><b>5</b></p> <p>Stellen Sie eine Stoppuhr auf fünf Minuten.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Nach fünf Minuten füllen Sie Entwicklerlösung in die Vertiefung, die mit einer Flasche markiert ist. Benutzen Sie dazu die mitgelieferte Pipette und platzieren Sie die Spitze bei der Befüllung direkt in der Vertiefung.</p>
<p><b>7</b></p> <p>Stellen Sie nun die Stoppuhr auf 15 Minuten. In dieser Zeit erscheint in beiden Kontrollfenstern ( C ) eine rosa bis rote Linie.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Lesen Sie die Ergebnisse nach 15 Minuten ab. Ein positives Ergebnis zeichnet sich durch eine rosa-rote Linie neben dem spezifischen Allergencode aus.</p>	<p><b>9</b> Beispiele von positiven Ergebnissen</p> <p>Die Farbintensität eines positiven Resultates kann zwischen leicht rosa und dunkelrot variieren.</p>

## Ergebnisse direkt – klar und einfach

ImmunoCAP® Rapid erstellt ein IgE-Allergie-Profil für Kinder und Erwachsene mit Symptomen, Giemen oder Rhinitis. Sie füllen nur das Blut in den Probenträger und nach 20 Minuten ist das Ergebnis als rote Linie sichtbar. Dann diskutieren Sie Behandlungsmöglichkeiten und weiterführende Massnahmen noch bevor der Patient Ihre Praxis verlässt.

[thermoscientific.com/phadia/de-ch](http://thermoscientific.com/phadia/de-ch)

© 2012 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries. Legal Manufacturer, Phadia AB, Uppsala Sweden.


Phadia AG Sennweidstrasse 46 CH-6312 Steinhausen T 043 343 40 50 F 043 343 40 51



## Ist es eine Allergie?

## ImmunoCAP® Rapid Ergebnisse direkt – klar und einfach

ImmunoCAP® Rapid Asthma/Rhinitis Adult erstellt ein IgE-Allergie-Profil für Erwachsene mit Asthma- oder Rhinitis-Symptomen. Blut in die entsprechende Vorrichtung einfüllen und nach 20 Minuten das Ergebnis ablesen. Noch bevor der Patient die Praxis verlässt kann über die Behandlung und weiterführende Untersuchungen diskutiert werden.

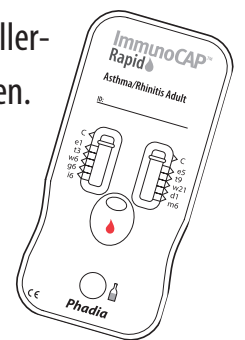



50 % der Erwachsenen mit Asthma leiden an einer zugrunde liegenden Allergie und können von einer differenzierten Diagnose und der daraus resultierenden Therapie profitieren.

### Symptome

- Pfeifende Atmung
- Hustenreiz
- Bronchospasmus

### Körperliche Befunde

- Verlängerte Ausatmung
- Bronchiales Atemgeräusch bei Auskultation
- Abgeschwächtes Atemgeräusch („silent lung“)
- Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
- Vermehrte Schleimproduktion




Bei bis zu 6 von 10 Erwachsenen mit saisonaler Rhinitis und bei mindestens jedem zweiten Erwachsenen mit ganzjähriger Rhinitis liegt eine Allergie zugrunde. Diese Patienten profitieren von einer differenzierten Diagnose und der daraus resultierenden Therapie.

### Symptome

- Nasale Obstruktion
- Salvenartige Niesanfälle
- Wässriger Ausfluss aus der Nase
- Juckreiz in Nase und Augen
- Müdigkeit
- Hörverlust

### Körperliche Befunde

- Schwellung der Nasenschleimhaut – Farbe der Schleimhaut variiert von blassrosa in der akuten Phase bis bläulichgrau in chronischen Situationen
- Mundatmung
- Riesenpapillen (sogenannte Pflastersteine)
- Livide Augenschatten (bläulich-violette Verfärbung der Haut unter den Augen)
- Querfalte im Bereich der Nasenspitze (durch repetitives Hochreiben der Nase)

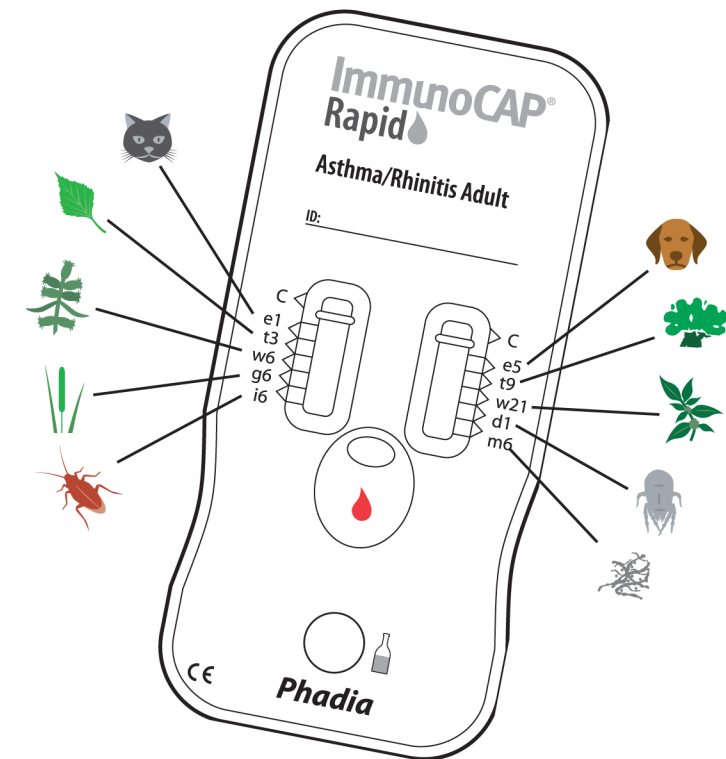

### ImmunoCAP® Rapid Asthma/Rhinitis Adult

Allergietest, der die 10 häufigsten Allergene mit nur einem Tropfen Blut erfasst:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| e1 Katze        | e5 Hund           |
| t3 Birke        | t9 Esche          |
| w6 Beifuss      | w21 Glaskraut     |
| g6 Lieschgras   | d1 Hausstaubmilbe |
| i6 Küchenschabe | m6 Schimmelpilz   |

### Ergebnisse direkt – klar und einfach

#### Resultate direkt

Probe und Test an Ort und Stelle. Ergebnisse liegen in 20 Minuten vor, direkte Aktionen und weiterführende Massnahmen können gestartet werden.

#### Klar

zuverlässig, gut sichtbar und einfach zu verstehen. Hilft die Frage zu beantworten „Ist es eine Allergie?“

#### Einfach

Ready-to-use Test mit Allergenen, entsprechend der Symptome und des Alters vorselektiert. Kein spezielles Training erforderlich. Alle Komponenten sind im Kit enthalten – nur Blut hinzufügen!