
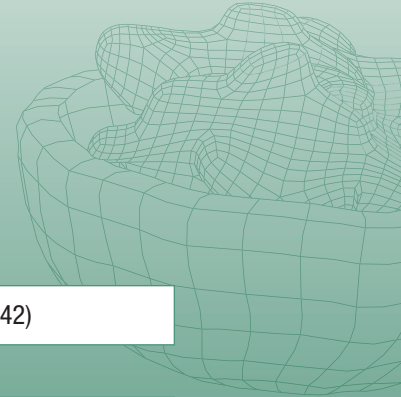


## Empfohlenes Testprofil

ImmunoCAP®  
Gesamtextrakt

ImmunoCAP  
Allergen-  
komponenten

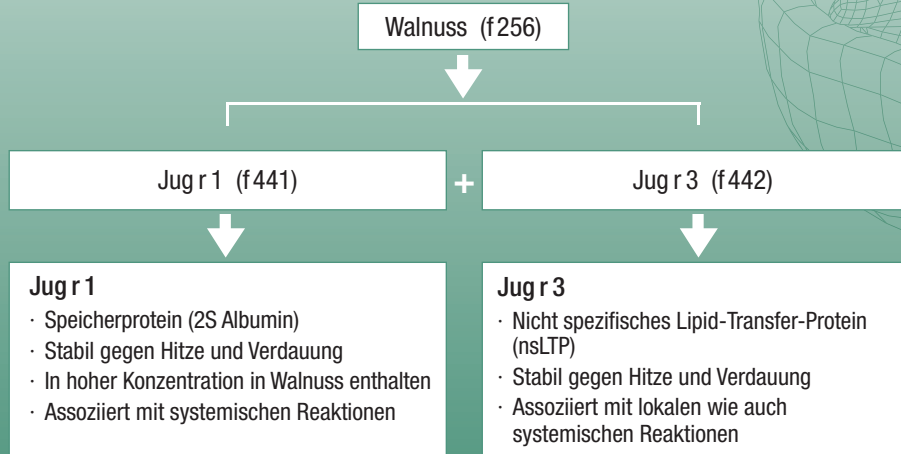

Positiv getestetes f256 bei negativem Jug r 1 und Jug r 3 kann erklärt werden durch:

- Sensibilisierung gegen andere Speicherproteine der Walnuss
- Sensibilisierung gegen kreuzreaktive Kohlenhydratdeterminanten (CCD)

- Kreuzreaktivität mit Pollenproteinen wie Profilin oder PR-10 Protein. Aufgrund des hohen Maßes an Homologie können als Marker Bet v 1 (als PR-10 Protein) bzw. Phl p 12 (als Profilin) getestet werden.

## slgE gegen Jug r 1 und Jug r 3 ist mit einem erhöhten Risiko für systemische Reaktionen verbunden

Walnuss positiv + Jug r 3 und 1 negativ

Walnuss positiv + Jug r 3 positiv

Walnuss positiv + Jug r 1 positiv

Geringes Risiko einer schweren Reaktion

Hohes Risiko einer schweren Reaktion

### Risikobewertung

Das Risiko für klinische Symptome steigt mit zunehmender Proteininstabilität und Allergenmenge.

Profilin

PR-10

Jug r 3

Jug r 1